

環境清拭用 **ルビスタ**[®] メディカル **ワイプ** (100枚入)の使用方法

準備する物



使用用途

よく手が触れる環境表面※1、
医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に

※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、
便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり 等

※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください

★ルビスタ ワイプはトイレに流せません



溶液の調製(準備)




★ルビスタクリアを完全に溶かしてから使用します ※溶解には2分程度かかります


★すぐにワイプの作製を行わない場合は付属キャップを閉めて保管します

★ワイプロールに調製液を注ぐ際は飛び散らない様にゆっくりと注ぎます

ワイプの作製(準備)

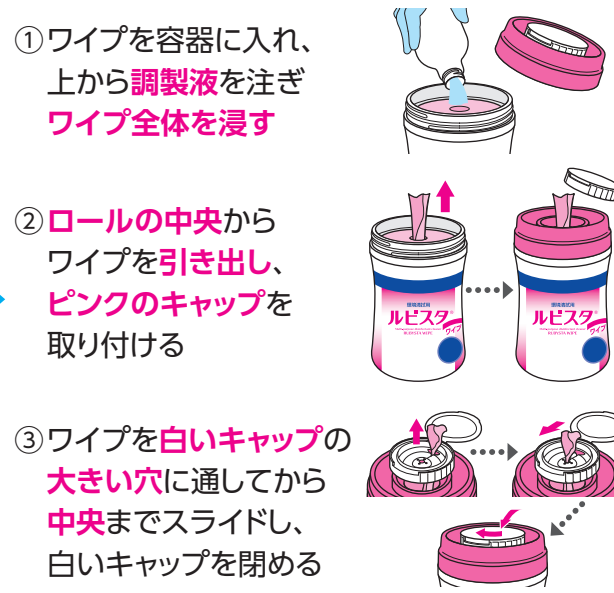

環境表面の清拭(使用)

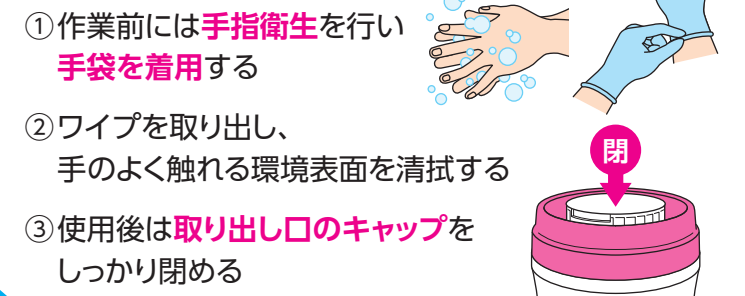

★清拭したワイプが汚れたら随時新しいワイプと交換します

★使用後のワイプや手袋は決められた場所に廃棄します

★清掃終了後は手指衛生を行います

ルビスタ ワイプの管理(使用后)

- ◎ 作製したワイプの使用期限は溶液の調製から7日間です
※調製日シールを用いて使用期限の管理をしてください
- ◎ 使用期限の過ぎたワイプは廃棄し、新たに作製します
※一度、容器内を水で軽くすすいでから作製してください
- ◎ 続けて使用しない用具は水洗いし、乾燥させ保管します