

# 1ステップで除菌&洗浄

## 広口タイプで 使いやすくなりました

従来のスプレーボトルに比べ  
注ぎ口のサイズが約**1.6倍**広く、  
調製ボトル\*として使いやすい仕様です。

\*付属のキャップを取り付けると、調製ボトルとしてご使用いただけます

### 特長

- パウダーが入れやすい
- 洗浄、すすぎがしやすい
- ボトル内を乾燥させやすい


付属キャップ  
使用イメージ



### 注ぎ口の広さ

- 環境除菌・洗浄剤ルビスタ  
スプレーボトル  
500mL用

直径22mm(原寸)

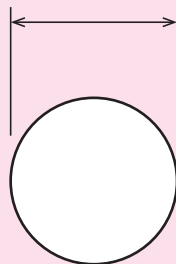


直径22mm



- 環境除菌・洗浄剤ルビスタ  
フォーマーボトル  
500mL用

直径34mm(原寸)

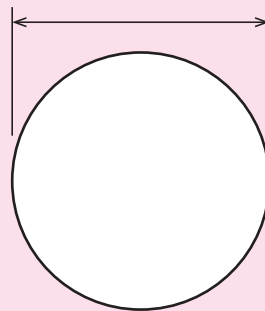

直径34mm



# 調製方法

## 溶液の調製(準備)

- ① 調製ボトルの  
**500mLライン**まで  
水道水を注ぐ



水道水  
500mL


- ② ルビスタクリアを  
**1包**入れ、  
キャップを閉めて  
軽く振る



ルビスタ  
クリア  
1包

## ワイプの作製(準備)


- ① ワイプを容器に入れ、  
上から**調製液**を注ぎ  
**ワイプ全体を浸す**

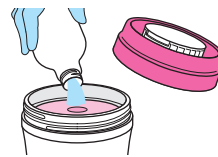

- ② **ロールの中央**から  
ワイプを**引き出し**、  
**ピンクのキャップ**を  
取り付ける



- ③ ワイプを**白いキャップ**の  
**大きい穴**に通してから  
**中央**まで**スライド**し、  
白いキャップを**閉める**

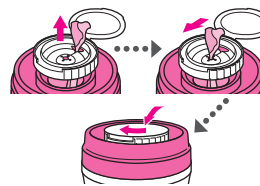

★ ルビスタクリアを  
**完全に溶かして**から使用します

※ 溶解には**2分程度**かかります

★ **すぐにワイプの作製を**  
行わない場合は

**付属キャップを閉めて保管**します

★ ワイプロールに調製液を  
注ぐ際は**飛び散らない様**に

**ゆっくりと注ぎ**ます

## 製品規格

品名	製品イメージ	内容量/規格	サイズ: 高さ×幅×奥行(mm)	重量(g)	メーカー希望 小売価格(税抜き)	JANコード
環境除菌・洗浄剤 ルビスタクリア パウダー5g		5g×30包	105×87×64	194	6,900円	4 987060 008961
環境除菌・洗浄剤 ルビスタ フォーマーボトル 500mL用		500mL(1包溶解用)	200×79×79	94	830円	4 987060 009289
環境清拭用 ルビスタ® ワイプ 100枚入 (詰替ワイプ入専用容器)		140mm×259mm 100枚	180×115×115	282	1,100円	4 987060 007780
環境清拭用 ルビスタ® ワイプ 詰替用 100枚入		140mm×259mm 100枚	140×97×97	158	840円	4 987060 007827

## 【お問合せ窓口】

杏林製薬株式会社 0120-093610

受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

詳しくはWebで

作成年月:2020.1  
RST0202