

# 1ステップで除菌&洗浄

環境除菌・洗浄剤

## ルビスタクリア

Multi-purpose disinfectant cleaner  
RUBYSTA Clear

新発売

### 環境表面の感染対策に 幅広く役立ちます

洗浄作用を併せ持つ塩素系除菌洗浄剤です

改良型の塩素系製剤<sup>\*1</sup>であり  
塩素臭はほとんど気になりません

金属やプラスチックなどの素材に対する  
影響が少ない製剤です

EPA<sup>\*2</sup>に登録<sup>\*3</sup>され、  
医療施設等の環境衛生に使用されています



<sup>\*1</sup>ルビスタクリアはペルオキソ-硫酸水素カリウムを配合した製剤で、従来の次亜塩素酸ナトリウムを成分とする製品で問題となっていた塩素臭が少なく、金属の腐食もほとんどありません。〔杏林製薬社内資料/DuPont社資料〕  
<sup>\*2</sup>EPA: Environmental Protection Agency (米国環境保護庁)  
<sup>\*3</sup>ルビスタクリアは米国でRely-On™ Multi-Purpose Disinfectant Cleaner等の製品名で登録されています。

#### 主な使用箇所(例)

ルビスタクリアは手のよく触れる環境表面<sup>\*4</sup>の除菌・洗浄に使用してください

<sup>\*4</sup>大理石や銅、亜鉛および軟鋼などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください




ベッド柵・テーブル・床頭台など



ドアノブ・扉



便座・フタ・手すり・汚物入れ

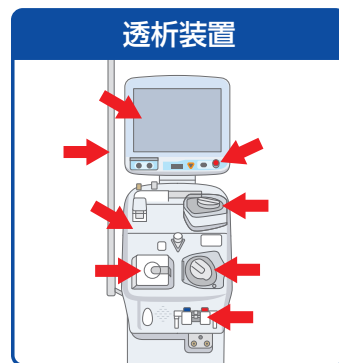

透析装置外装・付属品

# 環境除菌・洗浄剤 ルビスタクリア

## 内容量／規格

- パウダー5g×30包

## 用途

- よく手が触れる環境表面※1、医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に
- ※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり等
- ※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください

## 使用方法

- 本品1包(5g)に対して水道水500mL(500g)で溶かし、1%(w/v)の調製液を作製してください。なお、溶けにくい場合は、ぬるま湯をご使用ください。●調製液は、調製後約7日間有効です。●調製液は、直射日光を避け、常温で保管してください。●環境清拭用ルビスタワイブに付属のワイブ、あるいは市販の環境清拭用ワイブ等に調製液を浸してご使用ください。ワイブに浸して使用する場合には、含浸ワイブは作製後速やかにご使用ください。

## 「使用方法」に関する注意

- 定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製液を使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛および軟銅などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

## 成分

- 酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム)
- 界面活性剤(ドデシルベンゼンサルホン酸ナトリウム)
- 添加物:香料 ●液性:酸性

## 使用上の注意



小児の手の届くところに保管しない



飲むくすりではありません

- 用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●本品および調製液を飲み込まないようにしてください。誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けてください。医師の指示がない限り、無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識のない場合には、何も与えないでください。●目に入らないように注意してください。目に入った場合には、速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●本品、調製液を取り扱う際には、ゴム手袋、プラスチック手袋等をご使用ください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。

## 保管および取扱い上の注意

- 本品は、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。●清潔な容器を使って調製してください。●使い終わった容器、ワイブ等は、お住まいの地域の規定に従って廃棄してください。●本品の使用期限は製造月から36ヶ月です。

## ルビスタ製品ラインナップ

品名	製品イメージ	内容量／規格	サイズ: 高さ×幅×奥行き(mm)	重量(g)	メーカー希望 小売価格(税抜き)	JANコード
環境除菌・洗浄剤 ルビスタクリア パウダー5g		5g×30包	105×87×64	194	6,900円	4 987060 008961
環境清拭用 ルビスタ ワイブ 100枚入 (詰替ワイブ入専用容器)		140mm×259mm 100枚	180×115×115	295	1,100円	4 987060 007780
環境清拭用 ルビスタ ワイブ 詰替用 100枚入		140mm×259mm 100枚	140×96×96	182	840円	4 987060 007827
環境清拭用 ルビスタ ワイブ 300枚入 (詰替ワイブ入専用容器)		145mm×250mm 300枚	210×210×210	1,004	5,080円	4 987060 008015
環境清拭用 ルビスタ ワイブ 詰替用 300枚入		145mm×250mm 300枚	145×158×158	520	2,700円	4 987060 007810
環境除菌・洗浄剤 ルビスタ 調製ボトル 1.5L用		1,500mL(3包)溶解用	297×103×103	110	860円	4 987060 007797
環境除菌・洗浄剤 ルビスタ スプレーボトル 500mL用		500mL(1包)溶解用	214×72×82	70	570円	4 987060 007803

## 【お問合せ窓口】

杏林製薬株式会社 0120-093610

受付時間 9:00～17:00(月～金 ※土日祝日除く)

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

詳しくはWebで

ルビスタ

検索

作成年月:2018.9